

Ceramspray

Anwendungsbereich:

Separierspray für die Keramik. Zum Isolieren von Modellen und aufgetragener Keramikmasse.

Anwendungsweise:

Vor Gebrauch gut schütteln!

Nach einmaligem Aufsprühen aus ca. 5-8 cm ca. 1 Minute warten, dann ein 2. Mal auftragen. Nur kurze Sprühstöße tätigen, Pfützenbildung, z.B. in tieferen Alveolen, vermeiden. Ein gezielter Auftrag mittels Pinsel ist ebenfalls möglich.

Qualität:

Diaswiss Ceramspray gewährleistet ein sicheres Isolieren von Modelloberflächen zu aufgetragener Keramik und ermöglicht ein problemloses Abheben der Modellation für den Brennvorgang. Keine Gefahr einer Kreuzkontamination wie bei Pinselflaschen. Eventuell anhaftendes Liquid verbrennt rückstandslos.

Risiken:

Vermeiden Sie das Einatmen von Sprühnebel.

Lagerung:

- Dose steht unter Druck.
- Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Vor Erwärmung über 50°C schützen.

Entsorgung:

Mit dem allgemeinen Laborabfall (Blechdosen)

Hersteller:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14