

Indicaciones de uso para instrumentos especiales para laboratorio dental para la aplicación mayormente en seco sobre zirconio y cerámica de disilicato de litio.

Indicación:








Contorneado y pulido de zirconio sinterizado y cerámica de disilicato de litio. Tratamiento de zirconio en estado de tiza.

Regla general:







Los instrumentos requieren de refrigeración por agua  si las partículas de diamante son visibles a simple vista ! Evitar chispas durante el procesamiento.

Aplicación:






Procesamiento de zirconio con efecto modelador

Diamantes para pieza de mano para zirconio	Pieza de mano 25' – 30000 r.p.m., ligera presión de contacto	
Diazircon grueso	9848 G 040 // Pieza de mano 3' – 18000 r.p.m., ligera presión de contacto 9507 G 110 // Pieza de mano 3' – 5000 r.p.m., ligera presión de contacto	 
Poli-Max I	800HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto 801HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto	 
Poli-Max II	810HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto 811HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto	 

Prepulido de zirconio


Diazircon mediano	9848 035 // Pieza de mano 3' – 15000 r.p.m., mediana presión de contacto 9502 060 // Pieza de mano 3' – 15000 r.p.m., mediana presión de contacto 9777 170 // Pieza de mano 3' – 8000 r.p.m., mediana presión de contacto 9507 110 // Pieza de mano 3' – 5000 r.p.m., mediana presión de contacto	   
Poli-Max III	820HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto 821HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto	 


Hochglanzpolieren Zirkon

Diazircon polish	9507 C 050 // Pieza de mano 3' – 5000 r.p.m., mediana presión de contacto 9500 C 150 // Pieza de mano 3' – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto	 
Poli-Max Supergloss	830HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto 831HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto 832HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto	  


Indicaciones de uso para instrumentos especiales para laboratorio dental para la aplicación mayormente en seco sobre zirconio y cerámica de disilicato de litio.


Procesamiento de zirconio en estado de tiza con efecto modelador

Poli-Max 2-Phase 850HP // Pieza de mano 5' – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto parte blanca abrasiva, parte azul trabajo fino 


Poli-Max 2-Phase, fino 840HP // Pieza de mano 5' – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto parte gris abrasiva, parte blanca trabajo fino 


Prepulido de cerámica de disilicato de litio y procesamiento con efecto modelador


Poli-Max III 820HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto 

821HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto 

Pulido de alto brillo cerámica de disilicato de litio

Poli-Max Supergloss 830HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto 

831HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto 

832HP // Pieza de mano – 10000 r.p.m., mediana presión de contacto 

Riesgos:

Evite la inhalación de polvos de cerámica!

Fabricante:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 01/17