

**Istruzioni per l'uso di strumenti speciali per il laboratorio dentale, principal-mente per uso a secco su ceramiche a base di disilicato di zirconio e di litio.**

**Indicazione:**

sagomatura e lucidatura di zirconia sinterizzata e di ceramiche al disilicato di litio. Lavorazione della zirconia allo stato gessoso

**Regola generale:**

**Gli strumenti richiedono il raffreddamento ad acqua  quando le particelle di diamante sono visibili a occhio nudo! Durante la lavorazione, evitare la formazione di scintille.**

**Modo d'uso:**

<b><i>Sagomatura della zirconia</i></b>		
HST Diamanten für Zirkon	manipolo 25' - 30000 rpm, pressione leggera	
Diazircon coarse	9848 G 040 // manipolo 3' - 18000 rpm, pressione leggera 9507 G 110 // manipolo 3' - 5000 rpm, pressione leggera	 
Poli-Max I	800HP // manipolo - 10000 rpm, pressione media 801HP // manipolo - 10000 rpm, pressione media	 
Poli-Max II	810HP // manipolo - 10000 rpm, pressione media 811HP // manipolo - 10000 rpm, pressione media	 
<b><i>Pre-lucidatura zirconia</i></b>		
Diazircon medium	9848 035 // manipolo 3' - 15000 rpm, pressione media 9502 060 // manipolo 3' - 15000 rpm, pressione media 9777 170 // manipolo 3' - 8000 rpm, pressione media 9507 110 // manipolo 3' - 5000 rpm, pressione media	   
Poli-Max III	820HP // manipolo - 10000 rpm, pressione media 821HP // manipolo - 10000 rpm, pressione media	 
<b><i>Lucidatura ad alta brillantezza zirconia</i></b>		
Diazircon polish	9507 C 050 // manipolo 3' - 5000 rpm, pressione media 9500 150 // manipolo 3' - 5000 rpm, pressione media	 
Poli-Max Supergloss	830HP // manipolo - 10000 rpm, pressione media 831HP // manipolo - 10000 rpm, pressione media 832HP // manipolo - 10000 rpm, pressione media	  
<b><i>Sagomatura della zirconia allo stato gessoso</i></b>		
Poli-Max 2-Phase	850HP // manipolo 5' - 10000 rpm, pressione media parte bianca abrasiva, parte blu rifinitura	

**Istruzioni per l'uso di strumenti speciali per il laboratorio dentale, principalmente per uso a secco su ceramiche a base di disilicato di zirconio e di litio.**

Poli-Max 2-Phase, fein                      840HP // manipoło 5' - 10000 rpm, pressione media parte grigia abrasiva, parte bianca lavoro di rifinitura 

***Sagomatura e prelucidatura di ceramiche a base di disilicato di litio***

Poli-Max III                                      820HP // manipoło - 10000 rpm, pressione media   
821HP // manipoło - 10000 rpm, pressione media 

***Lucidatura ad alta brillantezza di ceramiche a base di disilicato di litio***

Poli-Max Supergloss                      830HP // manipoło - 10000 rpm, pressione media   
831HP // manipoło - 10000 rpm, pressione media   
832HP // manipoło - 10000 rpm, pressione media 

**Fattori di rischio:**

**Evitare di inalare le polveri della ceramica!**

**Produttore:**

DIASWISS S.A. \* Rte de St Cergue 293 \* CH-1260 Nyon \* Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 01/17