

Surgicut Soft Tissue Trimmer

Anwendungsbereich:

Unblutiges bzw. minimal blutendes Schneiden von oralem Weichgewebe. Zum ausschließlichen Gebrauch in zahnärztlichen FG Handstücken.

Anwendungsweise:

Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) siehe separate Aufbereitungs-anweisung.

Vor jedem Gebrauch ist die Arbeitsspitze auf Unversehrtheit hin zu überprüfen. Für optimale Leistung sind die empfohlenen Richtdrehzahlen von 30.000 – 300.000 min⁻¹ (UpM) einzuhalten. Um die kauternde Wirkung des Instruments zu nutzen, ist eine Wasserkühlung beim Schneiden nicht erwünscht! Instrument nur mit vorgeschriebener Drehzahl in die Mundhöhle einbringen. Hinweise des Turbinenherstellers sind zu beachten.

Warnhinweise:

Hebeln, Verklemmen sind zu vermeiden (Bruchgefahr). Anpressdruck und Geschwindigkeit richten sich nach der Topographie der Mucosa. Nur in vorgesehener Richtung/Weise verwenden. Die Angaben des Turbinenherstellers sind zu beachten. Lagerung des Instruments nicht in Kunststofftüten. Am besten trocken bei Raumklima lagern. Vor der Entsorgung defekter oder verbrauchter Instrumente sind diese zu sterilisieren, um das Übertragen von Krankheiten zu vermeiden.

Qualität:

Rostfreier Stahl, gehärtete Profilkörper und Schäfte. Geprüftes, Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumdioxid.

Risiken:

Es sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch keine Risiken vorhanden

Entsorgung:

Unbrauchbare Instrumente sind vor einer klinikgerechten Entsorgung zu sterilisieren.

Hersteller:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 01/17

CE₁₂₅₀