

Diaspacer Stumpflack

Anwendungsbereich:

Stumpflacke dienen als Platzhalter für das Befestigungsmaterial bei Kronen- und Brückenarbeiten. DIASWISS liefert hierzu verschiedene Farben in unterschiedlichen Stärken, je nach der Gepflogenheit des Behandlers, in welcher Konsistenz er den Zement / Kleber verarbeitet.

Anwendungsweise:

Vor Gebrauch schütteln, bis eine gleichmäßige Farbtönung in der Flasche sichtbar ist. Mit dem in die Schraubkappe integrierten Pinsel gleichmäßig dünn auftragen. Als Grundierung / Stumpfhärtung empfehlen wir Diaspacer klar, der sich fest mit der nächsten aufzutragenden Schicht verbindet. Häufig sind Gipshärter nicht kompatibel mit Stumpflacken. Wir empfehlen die erste Schicht bis über die Präparationsgrenze auszudehnen um diese gegen mechanische Beschädigung zu schützen. Nach Trocknung der ersten Lage wird der eigentliche, farbige Stumpflack appliziert. Es ist ein gleichmäßig deckender Auftrag anzustreben, welcher ca. 1mm zirkulär vor der Präparationsgrenze endet. Ist der Lack zu dickflüssig, oder zeigt er eine zu lange Trocknungszeit, kann Diaspacer mit dem zugehörigen Verdünner etwas modifiziert werden.

Auftragsstärke:

Klar	3-5 µm
Blau	4-6 µm
Rot	8-12 µm
Silber	12-14 µm
Gold	14-16 µm

Die Trocknungszeit beträgt ca. 30 Sekunden. Nach der Trocknungszeit können weitere Schichten aufgetragen werden. Die Viskosität kann mit dem dazu gehörenden Verdünner gesteuert werden.

Schutzmaßnahmen:

Handschutz: Schutzhandschuhe aus **PVC** tragen. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt: Schutzcremes auf die Hautflächen auftragen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen.

Augenschutz: Zum Schutz gegen Lösungsmittelspritzer Schutzbrille tragen.

Körperschutz: Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (z.B. Baumwolle) oder hitzebeständiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautflächen gründlich reinigen.

Eigenschaften:

- Beständig gegen Wasserdampf und Isoliermittel.
- Gleichmäßig deckend, kratzfest und isolierend.

Lagerung:

- Bei gleichmäßiger Temperatur nicht über 30° C.
- Beachten Sie die Vorschriften über das Lagern brennbarer Flüssigkeiten.

Diaspacer Stumpflack

Hersteller:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14